

СТОЙКА приборная

Модели:
Поток СП 01
Поток СП 02



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Бактерицидный облучатель «Поток»

Модель _____
изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ
и признан годным к эксплуатации.

МП _____

Начальник ОТК _____

личная подпись

_____ *расшифровка подписи*

_____ *число, месяц, год*

Адрес для предъявления претензий по качеству:
ООО «ЕС Сервис»
603003, г. Нижний Новгород,
пер. Свободы, 63
тел. 8 800 777 00 41
e-mail: info@buildinggroup.pro

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ВВЕДЕНИЕ

Мебель для медицинских учреждений: стойка приборная для рециркуляторов ПОТОК СП 01 для моделей 10001, 10002, 19002, 30002, СП 02 для моделей 30004, 89004 (далее по Руководству — стойка) предназначена для установки облучателя-рециркулятора.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СП 01	СП 02
Габариты (ДхГхВ), мм	320x305x905	495x360x905
Масса НЕТТО/БРУТТО, кг	2,8/ 2,9	3,4/ 3,5

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Устанавливайте стойку на ровной горизонтальной поверхности;
- Не ставьте на стойку посторонние предметы;
- Перед каждым использованием проверяйте стойку на наличие механических повреждений, надежность крепления всех элементов.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Основание поставьте штатив, совместив отверстия, вставьте болты и закрепите гайкой подложив шайбу.

Стойки СП 01: Для установки облучателя-рециркулятора Поток 10001, 10002, 19002, 30002 в места установленных резьбовых отверстий рециркулятора установите кронштейн винтами М6 из комплекта крепежа и подвесить облучатель-рециркулятор на винты на штативе.

Стойка СП 02: Вставьте ножки рециркулятора 30004, 89004 в пазы на основании.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Наружная поверхность рециркулятора изготовлена из металла, покрытого порошковой краской, допускается очистка дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РФ для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.

Условия эксплуатации: температура от +5°C до + 40°C; относительная влажность 80% при температуре 24°C.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от -40°C до +45°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков.

Транспортировка и хранение стойки без упаковки завода изготовителя не гарантирует сохранность стойки. Повреждения стойки в результате транспортирования или хранения без упаковки завода-изготовителя устраняются потребителем.

7. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Штатив. 1 шт.
2. Основание 1 шт.
3. Комплект крепежа 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации 1 экз.

ПРИМЕЧАНИЕ: Предприятие-изготовитель систематически ведет работу по улучшению конструкции стойки, поэтому возможны некоторые изменения, не отражаемые в настоящем Руководстве.

